


Bedienungsanleitung

Revolution Poollift



Revolution Komponenten

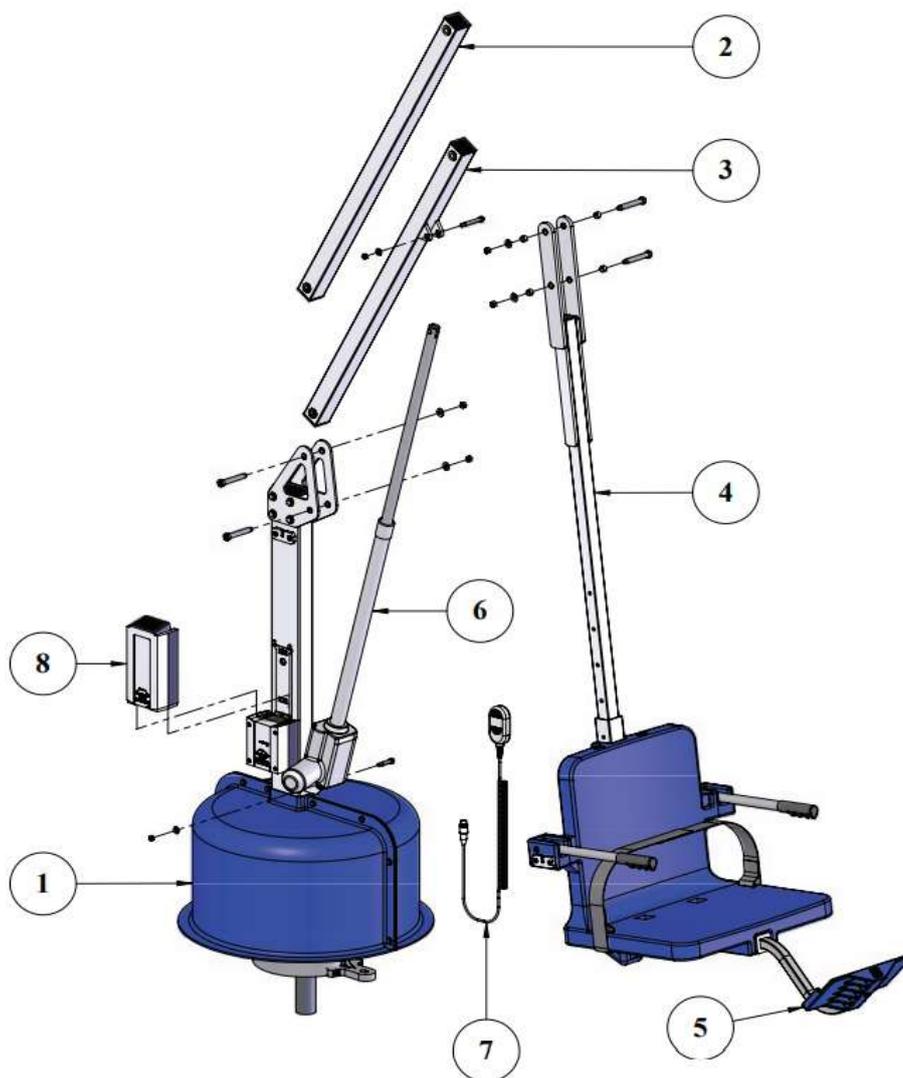

1. Revolution Sitz
2. Steuerarm
3. Hebearm
4. Sitzarm
5. Fusstütze
6. Stellglied
7. Handbedienung
8. 24V Batterie

Bedienung



Die Steuereinheit hat vier Tasten, mit der alle Liftbewegungen kontrolliert werden. Die Pfeile zeigen die Bewegungsrichtung an.

Im Sitz integrierte Armlehnen sorgen für einen besseren Halt beim Platznehmen auf dem Sitz. Der Lift darf nur mit angeschnalltem Sicherheitsgurt verwendet werden.

Das Personal oder der Benutzer, die das Gerät bedienen, müssen mit seinem Gebrauch vertraut sein. Wir verweisen auf die Verwendung und die Verantwortlichkeit für das Gerät von der Inbetriebnahme bis zum Betrieb und zur Wartung.

Sicherheitshinweise

- Erlauben Sie nicht unbefugten Personen oder unbeaufsichtigten Kindern den Poollift zu bedienen
- Lassen Sie Kinder nicht auf oder in der Nähe des Poollifts spielen
- Schwimmen Sie nie alleine
- Bedienen Sie den Poollift nicht unter Bedingungen oder Anwendungen, für die er nicht bestimmt ist
- Bedienen Sie den Poollift nicht in leeren Schwimmbecken
- Bedienen Sie den Poollift niemals mit hochgeklappten Armlehnen
- Befolgen Sie alle aufgeführten Wartungs- und Serviceanweisungen
- Laden Sie die Batterie 24h vor dem ersten Gebrauch
- Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch ganz auf
- Betreiben Sie den Poollift niemals auf einem Transportwagen
- Der Sitz oder Sicherheitsgurt darf nicht verwendet werden, falls er beschädigt oder verschlissen ist



Hinweise zur richtigen Pflege:

- Verwenden Sie zum Waschen Ihres Lifters nur frisches Wasser. Nicht mit Poolwasser waschen.
- Verwenden Sie für Ihren Poollift nur saubere, weiche, nicht scheuernde Tücher.
- Poollift nicht im Pumpenraum oder in der Nähe von Chemikalien lagern.
- Lassen Sie Kinder nicht auf oder in der Nähe dieses Poollifts spielen.
- Sprühen Sie beim Reinigen des Poollifts kein Wasser direkt auf den Steuerkasten oder die Batterie.

Verfahren	Vor jedem Gebrauch	Täglich	Wöchentlich	Monatlich
Überprüfen Sie die Batterieanzeige	✓			
Lassen Sie den Poollift einen vollständigen Testzyklus durchlaufen um zu überprüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert	✓			
Waschen Sie den Poollift mit frischem Wasser und trocknen Sie ihn mit einem sauberen, weichen Tuch		✓		
Batterie aufladen		✓		
Sichtprüfung des Poollift auf Beschädigung oder fehlende Teile		✓		
Prüfen Sie alle Kontaktstellen auf Beschädigung			✓	
Isolierfett auf alle Kontaktpunkte auftragen. Kontaktpunkte kontrollieren			✓	
Poollift gründlich reinigen und Pflegen um das Finish des Poollifts zu erhalten				✓
Überprüfen Sie alle Warn- und Vorsichtsetiketten, um sicherzugehen dass Sie nicht verblasst oder abgenutzt sind. Nach Bedarf ersetzen.				✓

Die Spezifikationen und Abbildungen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Strack AG übernimmt bei Änderungen oder Tippfehlern keine Haftung. Abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen darf dieses Dokument und/oder sein Inhalt ohne die vorherige schriftliche Genehmigung seitens der Strack AG weder ganz, noch teilweise, auf elektronische oder irgendeine andere Weise reproduziert, kopiert und/oder durch Druck, Fotokopie oder Mikrofilm veröffentlicht werden.

strack Liftsysteme

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch

ZSR-Nr. K 7514.14
NIF-Nr. 366 824
MWST-Nr. 567 970